



16500 - Sterilair Pro

Apparecchiatura per il trattamento biologico dell'aria - Versione a parete



CARATTERISTICHE

[Visita il sito dedicato al Rischio Biologico.](#)

Il problema delle infezioni aerogene.

Le contaminazioni aerogene sono da sempre un grave problema della nostra società, infatti vi sono molte malattie trasmesse per via aerea. *Meningite, difterite, tubercolosi, morbillo, rosolia, parotite, per arrivare alle semplici influenze, raffreddori e alle nuove forme influenzali che si sono presentate negli ultimi anni.* Possiamo considerare ad elevato rischio tutti quegli ambienti dove vi sia **forte addensamento o ricambio di persone** (locali pubblici, posti di ritrovo, scuole, asili etc.), **oppure ambienti sanitari o chirurgici**. Tutte queste infezioni sono sempre più diffuse, tanto che in alcuni casi sono definite addirittura pandemia e questo genera forti costi e grandi problematiche sociali. **L'utilizzo di dispositivi per trattare la carica biologica ambientale trovano un'applicazione immediata per ridurre il rischio di trasmissione di malattie trasmesse per via aerea**, sulla base delle raccomandazioni delineate dal CDC (Centers of Disease Control and Prevention), e **tali sistemi possono essere utilizzati in tutti gli spazi chiusi.**

La soluzione

STERILAIR Pro è un dispositivo studiato, progettato e prodotto 20 anni orsono, con la logica di creare un dispositivo estremamente performante grazie a lampade UV-C a scarica a vapori di mercurio testate per l'abbattimento delle particelle biologiche volatili per una **vita di 9000 ore**. Semplice e intuitivo da utilizzare, completamente programmabile, e a nessuna manutenzione.



STERILAIR Pro è dotato di ben **4 lampade** (che sono l'agente per il trattamento attivo), racchiuse in una apposita camera riflettente e questo assicura il massimo risultato biologico.

Grazie alle nostre scelte possiamo garantirvi il massimo risultato eliminando costi periodici e assicurandovi il più alto grado di sicurezza. Adottare **STERILAIR Pro** vuol dire:

- **Ridurre il rischio di contaminazione degli operatori**, come richiesto anche dal testo unico sulla sicurezza e recentemente consigliato anche da OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità);
- **Ridurre o eliminare la possibilità di contaminazione** degli operatori e dei pazienti;
- Avere un **ambiente batteriologicamente sicuro**.

*Salvaguardate la vostra immagine professionale e il vostro prestigio tutelando la vostra salute e quella dei vostri collaboratori e pazienti. **STERILAIR PRO** è il primo sistema di trattamento biologico dell'aria.*

Studiato e realizzato con un innovativo design, STERILAIR PRO permette di ovviare ai problemi di esposizione diretta ed indiretta ai raggi ultravioletti a corta lunghezza d'onda (UVC 254 nm) **offrendo la possibilità di un uso continuativo anche in presenza di persone** senza alcun rischio per quest'ultime.

Il più efficace mezzo per la distruzione di microrganismi presenti nell'aria.





Non un semplice depuratore, ma un dispositivo in grado di trattare
biologicamente l'aria



Sterilair PRO
è in grado di trattare ambienti sino
a 120 metri cubi

Il funzionamento è basato su un sistema di ventilazione forzata a ciclo chiuso. L'aria aspirata da **STERILAIR Pro**, passa prima attraverso un filtro antipolvere posizionato nella bocchetta d'ingresso, che ha il fine di bloccare gli inquinanti più grossolani, dando una prima depurazione all'aria. **Successivamente l'aria entra nella camera di irradiazione a diretto contatto di tubi a vapori di mercurio** che, grazie all'emissione di radiazioni UV-C espletano la massima azione germicida. L'aria viene espulsa dalla bocchetta d'uscita determinando così l'abbattimento microbiologico.


*Il grande vantaggio di questo sistema consiste **nell'assoluta mancanza di pericolosità per l'uomo** in quanto non si ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-C dall'apparecchiatura e non viene prodotto ozono.*

IL VANTAGGIO MASSIMO DI **STERILAIR PRO** è quello che può effettuare una disinfezione continua e costante dell'aria di qualsiasi ambiente, durante ogni fase lavorativa e in presenza di operatori. Potete così **programmare l'accensione** di **STERILAIR Pro** un paio d'ore prima del vostro arrivo in studio e poi mantenere accesa l'apparecchiatura durante tutta la vostra giornata lavorativa.


Il dispositivo STERILAIR Pro

Misure apparecchio

Schema del filtro primario

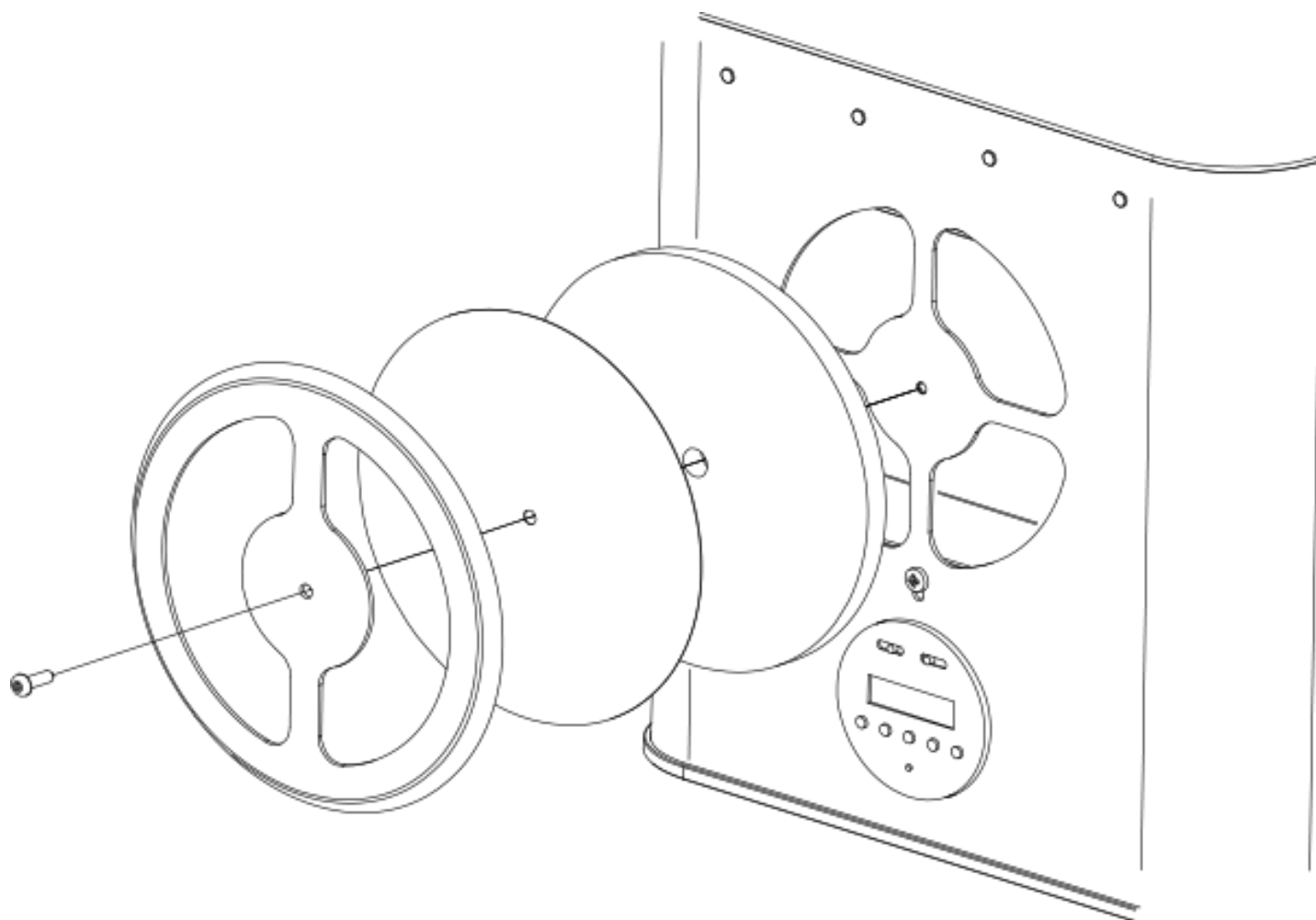

Funzionamento Sterilair PRO

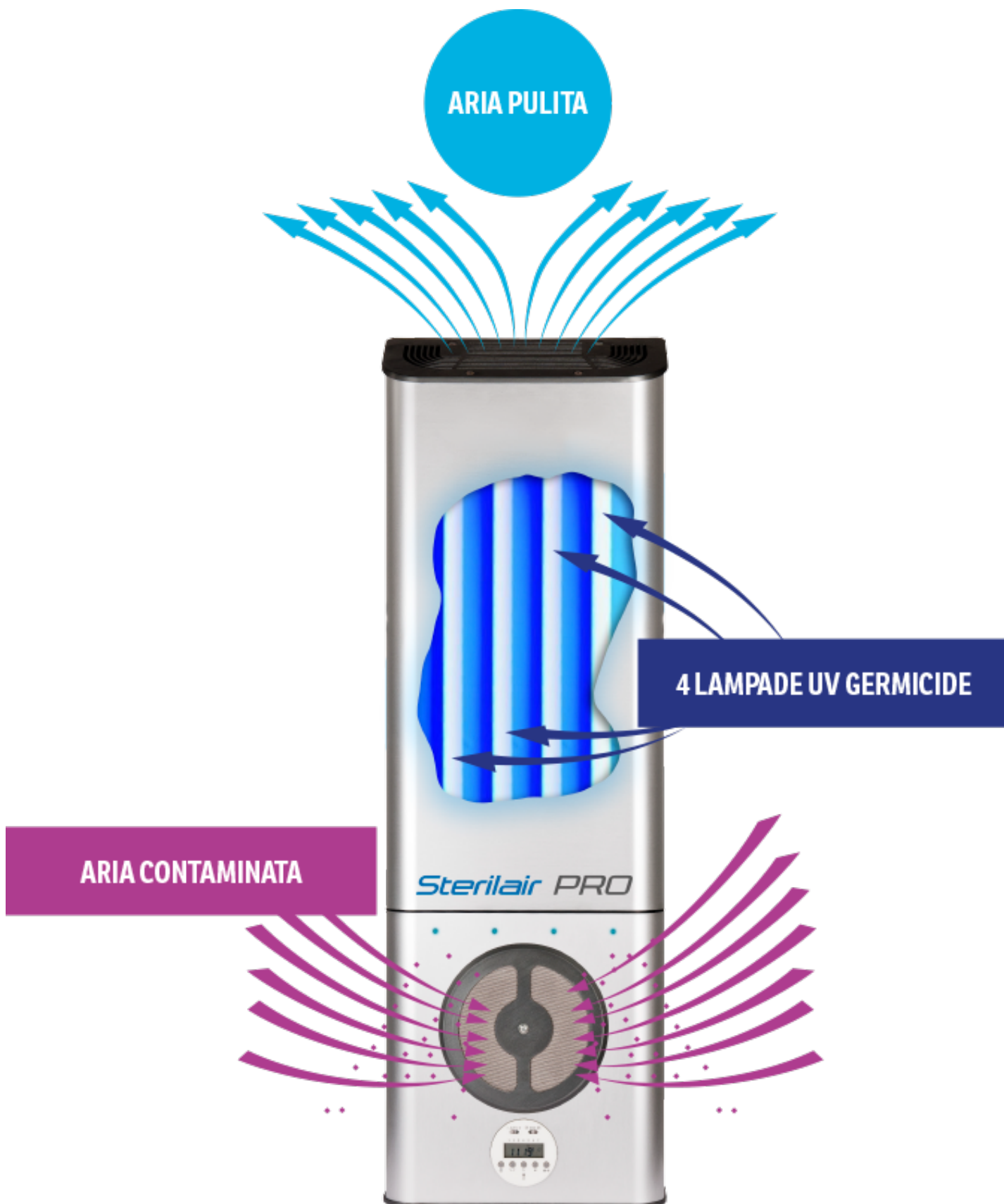

Sterilair PRO aspira l'aria dall'ambiente circostante fino a **120 m³ in 1 ora**, la convoglia verso le **4 lampade UVC Philips** che grazie al loro potere germicida trattano l'aria prima di essere reimmessa in circolo. Utilizziamo lampade ai vapori di mercurio per le loro **altissime prestazioni** e perchè le radiazioni emesse sono assolutamente **sicure per l'uomo**.

Timer di accensione/spegnimento



L'apparecchio è dotato di un timer settimanale programmabile che permette di trattare l'aria dello studio già prima dell'arrivo degli operatori e dei pazienti. Questo rende la zona di lavoro perfettamente sicura fin da subito. Inoltre si può impostare anche lo spegnimento per evitare inutili sprechi energetici (come nelle ore notturne o nel fine settimana) e per aumentare la durata dei benefici di **Sterilair PRO**. Con il timer integrato e programmabile potrete dimenticarvi di averlo, ma lui non si dimenticherà mai di voi!

Le radiazioni ultraviolette controllate

Vi sono vari metodi per decontaminare l'aria, ad esempio radiazioni ultraviolette libere, metodi chimici che utilizzano iodoformi, clorexidina, o derivati dell'ammonio quaternari o nebulizzati con apposite apparecchiature. Queste tecniche seppur ritenute efficaci, hanno un effetto temporaneo, infatti il loro utilizzo è relegato ai momenti in cui vi è assenza di operatori e assoluto stato di inattività.

Il metodo più idoneo e assolutamente più efficace è sicuramente l'utilizzo di radiazioni ultraviolette a lunghezza d'onda controllata. Questa ha una intensa attività microbica e virulicida nei confronti di numerosi microrganismi. Essa agisce bloccando la capacità riproduttiva dei microrganismi alterandone i cromosomi.

Il grande vantaggio del nostro sistema consiste **nell'assoluta mancanza di pericolosità per l'uomo** in quanto non si ha la minima fuoriuscita di radiazioni UV-C dal dispositivo.

Lampade a scarica ai vapori di mercurio a bassa pressione

Caratteristiche

- Emettono radiazioni UV ad onda corta con un picco di 253.7 nm (UV-C) per un'efficace azione germicida
- Il vetro della lampada fa da filtro alla linea dell'ozono (185 nm)
- Il rivestimento interno protettivo mantiene nel tempo l'efficacia dell'utile flusso dei raggi UV-C
- Un avvertimento sulla lampada indica l'emissione di radiazioni UV-C
- Neutralizzazione di batteri, virus e altri organismi primitivi
- Permettono la disinfezione di acqua, aria e superfici in ospedali, laboratori farmaceutici e di ricerca batteriologica e nelle aziende del settore della lavorazione alimentare come aziende lattiero-casearie, fabbriche di birra e panifici
- Disinfezione dell'acqua potabile, delle acque reflue, di piscine, impianti di condizionamento dell'aria, celle frigorifere, materiali

d'imballaggio, ecc.

- Impiego in un'infinità di processi fotochimici



**Per la vostra
sicurezza, per il
vostro staff, per i
vostri pazienti.**

DATI TECNICI

Altezza (cm)	82
Larghezza (cm)	27
Profondità (cm.)	11
Peso (kg)	12,5

VEDI ANCHE



**16502
Sterilair Pro**

Apparecchiatura per il trattamento
biologico dell'aria - Versione a
stativo



**8336
SatFinger II**



11220 Oxytest
Pulsiossimetro portatile completo
di sensore adulti, cavo USB e
batterie stilo AAA



8377
Termometro INFRARED
